

ΓΕΝΙΚΑ

Πεδίο εφαρμογής των οδηγιών χρήσης:

Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για τα παρακάτω εργαλεία που αναφέρονται συλλογικά ως φρέζες SS WHITE DENTAL: Κλινικές φρέζες καρβιδίου: Χειρουργικές φρέζες, σειρά Great White®, φρέζες τροχίσματος και φινιρίσματος, φρέζες στοματικής χειρουργικής, φρέζες για την κάλυψη σχισμών, εργαστηριακές φρέζες.

Προοριζόμενη χρήση:

- Οι φρέζες SS WHITE DENTAL προορίζονται για εφαρμογή σε οδοντιατρικό εργαλείο χειρός, το οποίο παρέχει την περιστροφή, επιτρέποντας στον χρήστη να κόψει σκληρές δομές στο στόμα, π.χ. δόντια ή οστό. Οι φρέζες SS WHITE DENTAL μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κοπή σκληρών μετάλλων, πλαστικών, υλικών από πορσελάνη και παρόμοιων υλικών.

Ενδείξεις χρήσης:

- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό τις οδηγίες ή από αδειούχο οδοντίατρο ή άλλο αδειούχο επαγγελματία. Οι φρέζες καρβιδίου είναι επεμβατικά τεχνολογικά προϊόντα μίας χρήσης που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποστειρωμένα, τα οποία ενδείκνυνται για τη θεραπεία ασθενών με οδοντική νόσο, όπως τερηδόνα ή βλάβη σκληρού ιστού.
- Οι φρέζες SS WHITE DENTAL διατίθενται σε αποστειρωμένα και μη αποστειρωμένα μοντέλα με διάφορες εμπορικές ονομασίες με πολυάριθμες διαμέτρους κεφαλής και μήκη εργασίας.

Αντενδείξεις:

- Μην το χρησιμοποιείτε σε άτομα με γνωστή αλλεργική ευαισθησία σε αυτό το μέταλλο.

Περιγραφή τεχνολογικού προϊόντος:

- Η οικογένεια φρεζών SS WHITE DENTAL περιλαμβάνει κλινικές φρέζες καρβιδίου και εργαστηριακές φρέζες καρβιδίου. Έχουν σχεδιαστεί για να εφαρμόζουν σε ένα σύστημα οδοντιατρικού κινητήρα και εργαλείου χειρός που παρέχει την περιστροφή, επιτρέποντας στον χρήστη να διαμορφώσει με ασφάλεια το σχήμα και να καθαρίσει οδοντικές δομές και δομές αποκατάστασης.
- Οι φρέζες SS WHITE DENTAL διατίθενται σε αποστειρωμένα και μη αποστειρωμένα μοντέλα με διάφορες εμπορικές ονομασίες με πολυάριθμες διαμέτρους κεφαλής και μήκη εργασίας. Τα τεχνολογικά προϊόντα που παρέχονται ως μη αποστειρωμένα μπορούν να αποστειρωθούν με χρήση αποστείρωσης με ατμό σε αυτόκαυστο.

Πληθυσμός ασθενών:

- Οι φρέζες SS WHITE DENTAL είναι γενικά οδοντιατρικά εργαλεία που προορίζονται για χρήση κατά τη διάρκεια οδοντιατρικών επεμβάσεων για να επιτρέπουν στον χρήστη να διαμορφώσει με ασφάλεια το σχήμα και να καθαρίσει τις οδοντικές δομές και τις δομές αποκατάστασης στον γενικό πληθυσμό ασθενών.

Προβλεπόμενος χρήστης:

- Αυτά τα τεχνολογικά προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Για χρήση μόνο από ή σύμφωνα με τις οδηγίες οδοντιάτρων.

Αναμενόμενα κλινικά οφέλη:

- Επιτυχής κοπή σκληρών δομών, όπως δόντια ή οστό, σκληρά μέταλλα, πλαστικά, πορσελάνη και παρόμοια υλικά, στο στόμα.

Σύνθεση:

- Η οδοντιατρική φρέζα ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ είναι ένα περιστροφικό τεχνολογικό προϊόν κοπής κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, το άκρο εργασίας του οποίου είναι κατασκευασμένο από καρβίδιο του βολφραμίου και το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόζει σε οδοντιατρικό εργαλείο χειρός. Εναλλακτικά, το τεχνολογικό προϊόν μπορεί να κατασκευαστεί πλήρως από καρβίδιο του βολφραμίου.

Οδηγίες χρήσης:

Τεχνική γνώση, εμπειρία, επιμόρφωση ή εκπαίδευση του προβλεπόμενου χρήστη:

Για χρήση μόνο από ή σύμφωνα με τις οδηγίες οδοντιάτρων.

Γενικές οδηγίες:

- ο Πριν από τη χρήση, αποστειρώστε τις φρέζες που παρέχονται ως μη αποστειρωμένες, σύμφωνα με τις επικυρωμένες διαδικασίες που παρέχονται παρακάτω.
- ο Επιλέξτε το σωστό εργαλείο χειρός που αντιστοιχεί στο στέλεχος της φρέζας που χρησιμοποιείται.
- ο Απελευθερώστε τον δακτύλιο σύσφιξης και εισαγάγετε πλήρως τη φρέζα στο εργαλείο χειρός.
- ο Βεβαιωθείτε ότι το τεχνολογικό προϊόν είναι ασφαλισμένο πριν από τη χρήση.
- ο Μην πιέζετε με δύναμη μια φρέζα μέσα στο εργαλείο χειρός. Σε περίπτωση δύσκολης πρόσβασης, ελέγξτε τόσο την κεφαλή του εργαλείου χειρός όσο και τη φρέζα και ανατρέξτε στις οδηγίες του εργαλείου χειρός για την αντιμετώπιση προβλημάτων
- ο Να ανατρέχετε πάντα στη συσκευασία του προϊόντος για τις μέγιστες RPM. Η χρήση της φρέζας εκτός του εύρους RPM μπορεί να προκαλέσει θραύση της φρέζας και να προξενήσει βλάβη στον ασθενή ή τον χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Παρότι τα προϊόντα της SS White είναι τεχνολογικά προϊόντα μίας χρήσης, ο κίνδυνος επαναχρησιμοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:
 - ο Διασταυρούμενη μόλυνση
 - ο Αδυναμία λόγω κόπωσης
 - ο Μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη αποτελεσματικότητα κοπής, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει αστοχία του τεχνολογικού προϊόντος ή δημιουργία μη επιθυμητής θερμότητας και να προξενήσει δυσφορία στον ασθενή, νέκρωση των δοντιών ή ιστική νέκρωση ή εγκαύματα στον ασθενή.

- Το τεχνολογικό προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες οδοντιάτρους ή κατόπιν οδηγιών τους.
- Θα πρέπει να προσέχετε την ταχύτητα εργασίας (περιστροφές ανά λεπτό, RPM)
 - ο Να ανατρέχετε πάντα στη συσκευασία του προϊόντος για τις μέγιστες RPM. Η χρήση της φρέζας εκτός του εύρους RPM μπορεί να προκαλέσει θραύση της φρέζας και να προξενήσει βλάβη στον ασθενή ή τον χρήστη.
 - ο Η λειτουργία της φρέζας σε πολύ υψηλές RPM μπορεί να δημιουργήσει μη επιθυμητή θερμότητα και να προκαλέσει δυσφορία στον ασθενή, νέκρωση δοντιών ή ιστική νέκρωση ή εγκαύματα στον ασθενή.
- Απαιτείται σωστός καταιονισμός κατά τη χρήση του τεχνολογικού προϊόντος. Η ανεπαρκής χρήση καταιονισμού μπορεί να δημιουργήσει μη επιθυμητή θερμότητα και να προκαλέσει δυσφορία του ασθενούς ή ιστική νέκρωση δοντιών ή ιστού ή εγκαύματα στον ασθενή.
- Μην εφαρμόζετε υπερβολική πίεση στη φρέζα, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μη επιθυμητή θερμότητα ή ενδέχεται να προκαλέσει αστοχία της φρέζας και τραυματισμό του ασθενούς ή του χρήστη.
- Οι φρέζες KAPBIDIOY πρέπει να αποστειρώνονται με ατμό πριν από την πρώτη χρήση, για την αποτροπή του κινδύνου λοίμωξης ή διασταυρούμενης μόλυνσης.
- Οι φρέζες KAPBIDIOY που επισημαίνονται και πωλούνται ως «Sterile» (Αποστειρωμένες) δεν απαιτούν περαιτέρω ενέργεια πριν από την πρώτη χρήση
- Εάν η συσκευασία για τεχνολογικά προϊόντα που φέρουν την επισήμανση «Sterile» (Αποστειρωμένα) έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της, το τεχνολογικό προϊόν πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά και να αποστειρώνεται με ατμό πριν από τη χρήση για να αποτραπεί ο κίνδυνος λοίμωξης ή διασταυρούμενης μόλυνσης.
- Μη χρησιμοποιείτε χημική ή ξηρή θερμότητα για την αποστείρωση των φρεζών SS WHITE DENTAL, καθώς αυτές οι διαδικασίες δεν έχουν επικυρωθεί για χρήση. Η χρήση αυτών των διαδικασιών μπορεί να είναι διαβρωτική για το τεχνολογικό προϊόν και θα μπορούσε να προκαλέσει πρόωρη αστοχία του τεχνολογικού προϊόντος.
- Χρησιμοποιείτε λαστιχένιο οδοντικό διάφραγμα κατά τη χρήση των φρεζών KAPBIDIOY για να αποφύγετε πιθανή εισρόφηση ή κατάποση του τεχνολογικού προϊόντος.
- Να φοράτε πάντοτε γάντια κατά τον χειρισμό μολυσμένων εργαλείων για να αποτρέψετε πιθανή λοίμωξη/διασταυρούμενη μόλυνση.
- Πρέπει να φοράτε προστατευτικά ματιών για την προστασία από εκτινασσόμενα σωματίδια, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό του χρήστη.
- Πρέπει να φοράτε χειρουργικές μάσκες για να αποφύγετε εισπνοή τυχόν αερολυμάτων ή τη δημιουργία σκόνης που θα μπορούσε να προκαλέσει πιθανή λοίμωξη/διασταυρούμενη μόλυνση.
- Διαβάστε προσεκτικά τις επισημάνσεις της συσκευασίας για να διασφαλίσετε τη χρήση του κατάλληλου τεχνολογικού προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθούν καθυστερήσεις στη διαδικασία ή τραυματισμός του ασθενούς ή του χρήστη.
- Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκληθούν τα εξής: Ζημιά στο σημείο προετοιμασίας, τραυματισμός του ασθενούς ή του χρήστη ή πιθανή αναρρόφηση ή κατάποση των φρεζών KAPBIDIOY.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες και τις οδηγίες της συσκευασίας για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση του κατάλληλου τεχνολογικού προϊόντος.

- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιέχει νικέλιο, μια χημική ουσία που είναι γνωστό στην πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλη αναπαραγωγική βλάβη.
- Επιθεωρείτε πάντοτε τις φρέζες πριν από τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε λαστιχένιο οδοντικό διάφραγμα κατά τη χρήση των φρεζών για να αποτρέψετε πιθανή εισρόφηση ή κατάποση υπολειμμάτων.
- Η χρήση φθαρμένων ή αμβλυμένων φρεζών θα μπορούσε να προκαλέσει μη επιθυμητή θερμότητα ή ενδέχεται να προκαλέσει αστοχία του τεχνολογικού προϊόντος.
- Η χρήση λυγισμένων φρεζών θα μπορούσε να προκαλέσει δονήσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν δυσφορία στον ασθενή ή ζημιά στο σημείο της προετοιμασίας.
- Μετακινήστε συνεχώς τη φρέζα όταν χρησιμοποιείται για να αποφύγετε την εντοπισμένη θέρμανση ή/και ζημιά στη φρέζα. Η δημιουργία μη επιθυμητής θερμότητας μπορεί να προκαλέσει δυσφορία στον ασθενή, νέκρωση των δοντιών ή ιστική νέκρωση ή εγκαύματα στον ασθενή.
- Αποφύγετε την αφαίρεση της φρέζας υπό πολύ αιχμηρή γωνία για να αποφύγετε τη μόχλευση και τη θραύση, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό του ασθενούς ή του χρήστη.
- Διατηρήστε τα εργαλεία χειρός σε καλή κατάσταση λειτουργίας για να διασφαλίσετε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα του τεχνολογικού προϊόντος. Εάν δεν συντηρήσετε σωστά τα εργαλεία χειρός ενδέχεται να προκληθούν καθυστερήσεις στη διαδικασία ή τραυματισμός του ασθενούς ή του χρήστη, εισρόφηση ή κατάποση του τεχνολογικού προϊόντος ή ζημιά στο σημείο της προετοιμασίας λόγω δόνησης ενός φθαρμένου σφιγκτήρα ή της κεφαλής.
- Βεβαιωθείτε ότι η φρέζα έχει εφαρμόσει πλήρως και έχει πιαστεί καλά στον δακτύλιο σύσφιξης του εργαλείου χειρός πριν από τη χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται το τεχνολογικό προϊόν να «αποσυνδεθεί» από το εργαλείο χειρός και να προκληθεί τραυματισμός του ασθενούς ή του χρήστη ή εισρόφηση ή κατάποση του τεχνολογικού προϊόντος.
- Ποτέ μην πιέζετε μια φρέζα μέσα σε ένα εργαλείο χειρός, καθώς αυτό θα μπορούσε να προξενήσει ζημιά στον δακτύλιο σύσφιξης του εργαλείου χειρός, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις στη διαδικασία.
- Οι βάσεις φρεζών SS WHITE DENTAL που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των τεχνολογικών προϊόντων για φύλαξη και αποστείρωση με ατμό δεν προορίζονται για τη διατήρηση της στεριότητας του τεχνολογικού προϊόντος. Οι φρέζες θα πρέπει να φυλάσσονται στη θήκη αποστείρωσης για την αποτροπή διασταυρούμενης μόλυνσης.
- Μην ωθείτε με δύναμη τις φρέζες KAPBIDIOY μέσα στις βάσεις φρεζών, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στη φρέζα ή να προκαλέσει την ενσφήνωσή της στη βάση φρεζών.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

- Να φοράτε πάντα ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ γάντια κατά τον χειρισμό ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ή/και μολυσμένων εργαλείων.
- Πρέπει να φοράτε προστατευτικά ματιών για την προστασία από δυνητική εκτόξευση σωματιδίων.
- Πρέπει να φοράτε χειρουργικές μάσκες για να αποφύγετε την εισπνοή τυχόν αερολυμάτων ή τη δημιουργία σκόνης.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ/ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ/ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Αναφέρετε κάθε σοβαρό περιστατικό που προκύπτει σε σχέση με το τεχνολογικό προϊόν στον

κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης/ασθενής.

Σοβαρό περιστατικό είναι οποιοδήποτε περιστατικό που οδηγεί άμεσα ή έμμεσα ή θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

- Θάνατο ασθενούς ή θάνατο χρήστη ή άλλου ατόμου
 - Σοβαρή επιδείνωση (μόνιμη ή προσωρινή) του ασθενούς ή των χρηστών ή της υγείας άλλου ατόμου
 - Σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανεπιθύμητα συμβάντα που αφορούν συγκεκριμένες οδοντιατρικές επεμβάσεις ή τεχνολογικά προϊόντα, δείτε τις οδηγίες χρήσης για το συγκεκριμένο προϊόν. Οι γενικές οδοντιατρικές επεμβάσεις έχουν πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα για τον ασθενή, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής:
- Καθυστέρηση της διαδικασίας λόγω απουσίας, ζημιάς ή φθοράς εργαλείων
 - Τραυματισμός σκληρού ή μαλακού ιστού ή/και πρόσθετη αφαίρεση δοντιού λόγω αμβλέων, κατεστραμμένων ή εσφαλμένα χρησιμοποιούμενων εργαλείων
 - Αλλεργικές αντιδράσεις λόγω υλικών που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή
 - Λοίμωξη λόγω ακατάλληλης επεξεργασίας εργαλείων
 - Βλάβη μαλακού ιστού λόγω αιχμηρών εργαλείων
 - Νευρολογική βλάβη από αιχμηρά εργαλεία ή τραύμα κατά τη διαδικασία
 - Ρηγμάτωση/Θραύση του τεχνολογικού προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές που μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο, αιμορραγία, βλάβη μαλακού ιστού, βλάβη σκληρού ιστού ή/και λοίμωξη.
 - Η χρήση του προϊόντος όταν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά ή έχει ανοιχτεί μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη.
 - Οι επιπλοκές που σχετίζονται γενικά με οδοντιατρικές επεμβάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο, αιμορραγία, βλάβη μαλακού ιστού, βλάβη σκληρού ιστού ή/και λοίμωξη.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- Μετά τη χρήση, τα προϊόντα θα πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα από τον χρήστη ως βιολογικά επικίνδυνο υλικό, σύμφωνα με τους τοπικές κυβερνητικές διατάξεις.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ:

- Οι φρέζες καρβιδίου θα πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία λειτουργίας/περιβάλλον δωματίου, μακριά από ηλιακή ακτινοβολία και διαβρωτικά χημικά υλικά, σε καθαρό, στεγνό χώρο.
- Οι φρέζες καρβιδίου θα πρέπει να φυλάσσονται στη θήκη αποστείρωσης (ή στη βάση εργαλείων) μέχρι να χρειαστούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ:

Ανατρέξτε στο έγγραφο IFU001 Οδηγίες αποθήκευσης, καθαρισμού και αποστείρωσης.

- Εάν η συσκευασία δεν επισημαίνεται ως «Sterile» (Αποστειρωμένη), τότε οι φρέζες πρέπει να

αποστειρώνονται με ατμό* πριν από τη χρήση.















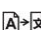

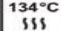







- Οι μη αποστειρωμένες φρέζες καρβιδίου πρέπει να αποστειρώνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που παρέχονται στο έγγραφο IFU001 πριν από τη χρήση.
- Οι αποστειρωμένες φρέζες καρβιδίου ΠΡΕΠΕΙ να φυλάσσονται στη σφραγισμένη θήκη στείρου φραγμού, για τη διατήρηση της στειρότητας ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
- Οι αποστειρωμένες φρέζες καρβιδίου δεν απαιτούν αποστείρωση πριν από τη χρήση ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ η συσκευασία στείρου φραγμού έχει υποστεί ζημιά.

Εάν η συσκευασία στείρου φραγμού έχει υποστεί ζημιά, οι φρέζες πρέπει να επιθεωρούνται, να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται σύμφωνα με τις επικυρωμένες διαδικασίες που παρέχονται στο έγγραφο IFU001 πριν από τη χρήση.

- Οι φρέζες καρβιδίου προορίζονται για μία χρήση μόνο και μπορεί να είναι διαθέσιμες είτε ήδη αποστειρωμένες με ακτινοβολία (σε συσκευασία στείρου φραγμού) είτε μη αποστειρωμένες, όπως προσδιορίζεται στη συσκευασία.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι βάσεις που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των τεχνολογικών προϊόντων για φύλαξη και την αποστείρωση με ατμό δεν προορίζονται για τη διατήρηση της στειρότητας του τεχνολογικού προϊόντος.

*Ανατρέξτε στις οδηγίες αποστείρωσης που περιλαμβάνονται στο έγγραφο IFU001.


Γλωσσάριο συμβόλων

Εικόνα	Τίτλος	Εικόνα	Τίτλος
	Κατασκευαστής		Προσοχή
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης		Ημερομηνία κατασκευής
	Κωδικός παρτίδας ή αριθμός παρτίδας		Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
	Αριθμός καταλόγου		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
	Χρήση έως		Ανακυκλώσιμο
	Να μην επαναχρησιμοποιείται		Να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά
	Αποστειρωμένο με χρήση ακτινοβολίας		Εισαγωγέας
	Μετάφραση		Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Αποστείρωση σε αυτόκαυστο σε συγκεκριμένη θερμοκρασία		Σύμβολο περιεχομένων
	Αποκλειστικό αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος		Αριθμός μοντέλου
	Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα		Υποδεικνύει τα μέγιστα και ελάχιστα όρια θερμοκρασίας στα οποία θα πρέπει να αποθηκευτεί, να μεταφερθεί ή να χρησιμοποιηθεί το αντικείμενο.
	Περιστροφές ανά λεπτό		Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτού του τεχνολογικού προϊόντος από ή κατόπιν εντολής

			«Οδοντίατρο/Ιατρού»
--	--	--	---------------------



1145 Towbin Ave • Lakewood, NJ 08701
732-905-1100 | 800-535-2877

 www.sswhitedental.com

Το SS White[®] Dental είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της SS White Burs, Inc. - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.